


Зеркало для тренировки речи предназначено для правильной постановки речи. Оно позволяет наблюдать за процессом образования произносимых ребёнком слов. Следить за артикуляцией, постановкой языка, а также эмоциями и мимикой. При необходимости ребенок с помощью взрослого может скорректировать произношение звуков, слов и выражение лица.

Логопед во время занятия дает воспитаннику услышать свою речь и указывает, что и как нужно исправить.

Ребенок может одновременно видеть и слышать себя, что способствует более глубокому осознанию правильного произношения звуков и слов. Логопед воспроизводит свою модель

речи, чтобы ребенок сравнил и проанализировал, какие именно аспекты произношения требуют исправления.

Зеркало позволяет записывать, перезаписывать, и сохранять в памяти до 4 речевых сообщений, длительностью до 30 секунд каждое. Оно оборудовано микрофоном и динамиками.

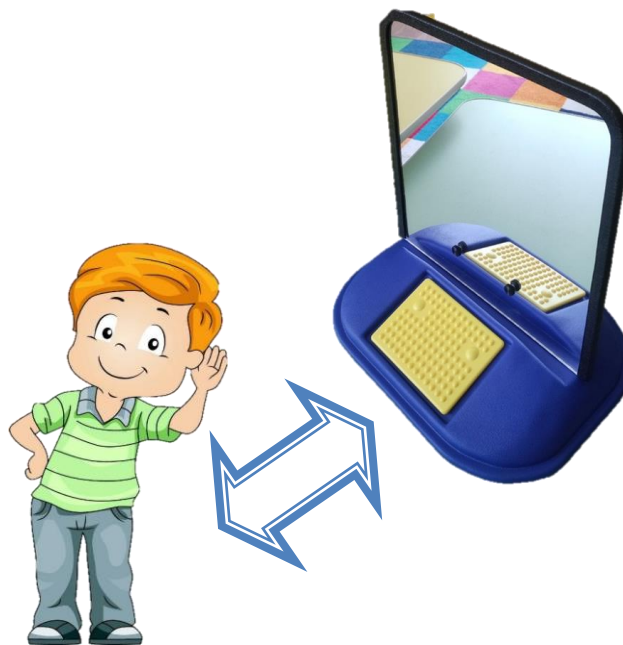

Направления работы

Развитие артикуляционной и мелкой моторики

Развитие просодики

Постановка, автоматизация, дифференциация звуков

Выработка самоконтроля

Рекомендуемый речевой материал для
работы с зеркалом для тренировки речи

**Пальчиковая
гимнастика**

**Артикуляционная
гимнастика**

Чистоговорки

Скороговорки

**Двустишия,
четверостишия**

МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска»
Адрес: 454139, г. Челябинск,
ул. Василевского 72, тел. (351)253-86-90,
e-mail: dou.29@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 29 г. Челябинска»

Зеркало для тренировки речи



Учителя-логопеды:
Е.И. Тюнева, Е.В. Шмотина

Челябинск, 2025

